

臨床ケースレポート 医療用品 4. 整形用品 高度管理医療機器 コラーゲン使用人工骨




Collagen Hybrid
リフィット®

右第2中手骨採骨(原疾患:右舟状骨偽関節) 症例: 36 歳 男性



術前

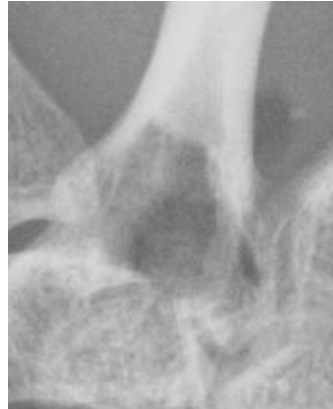


術直後




術後 1 ヶ月



術後 2 ヶ月

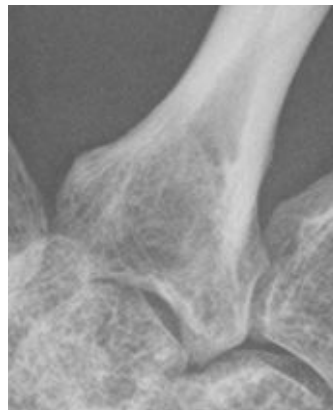


術後 4 ヶ月

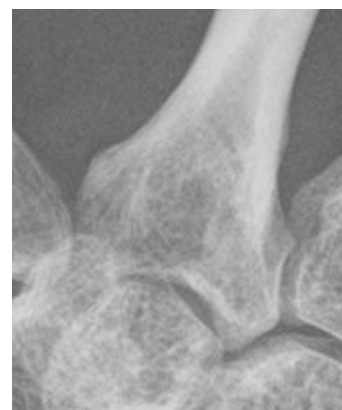

術後 6 ヶ月

CT画像

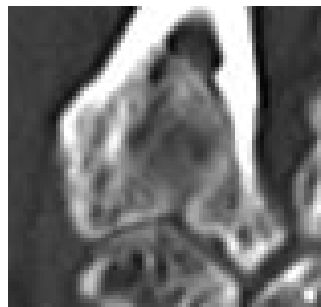

術後3ヶ月

PB-101010



10 × 10 × 10 mm


右舟状骨偽関節例に対し、第2中手骨基部背側から血管付で採骨し、移植した。その際に生じた第2中手骨基部の10×10mm弱の骨欠損に対してリフィット10×10×10mmのブロック1個(1mL)を生理食塩液に湿潤して充填した。術後1ヶ月で、リフィット充填部は髓内硬化と菲薄化/消失した皮質骨が明瞭化し骨再生と修復が認められる(→)。術後2ヶ月では、骨欠損部内の周囲との連続性が得られ自家骨との同化が得られている(→)。

昭和大学横浜市北部病院 整形外科 川崎 恵吉先生



Collagen Hybrid

リフィット®

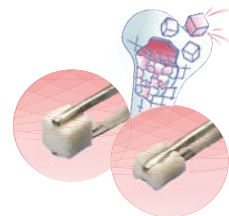

製品一覧

償還分類 ; 078 人工骨 (1) 汎用型 ②吸収型 イ多孔体 ii 蛋白質配合型

PB-101010



PB-103020



形 状	品 番	寸 法	包装単位/箱	区分名略称
ブロック	PB-101010	10×10×10 mm	1個 (1.0mL)	人工骨 : AB-06-2
	PB-103020	10×30×20 mm	1個 (6.0mL)	

【使用目的、効能または効果】

- 以下の骨欠損における骨再生の促進
 - ・骨腫瘍等、疾病の治療により生じた骨欠損
 - ・骨折等、外傷により生じた骨欠損
 - ・自家骨採取により生じた骨欠損
- 自家骨 (同種骨) 移植の補助/代替

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・アナフィラキシーの既往のあるアレルギー患者または 重度のアレルギー患者、もしくは他のブタコラーゲン含有製剤に対するアレルギーのあることが知られている患者。

※仕様、形状は一部変更することもあります。
※掲載の写真・形状図は実物大ではございません。

PENTAX

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 YKBエンサインビル
TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711

■札幌オフィス 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL:011-241-3473 FAX:011-241-3472
■仙台オフィス 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL:022-371-6944 FAX:022-371-8924
■名古屋オフィス 〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27 TEL:052-955-8572 FAX:052-955-8573
■大阪オフィス 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL:06-6263-1679 FAX:06-6263-1686
■福岡オフィス 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL:092-281-6860 FAX:092-281-6869

URL www.hoyatechnosurgical.co.jp

ご注文先

益子工場

〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町大字塙858
TEL 0285-72-6253 FAX 0285-72-6259