

APACERAM® HAブロック 臨床ケースレポート


若年者の椎体骨折にHAブロックを使用した椎体形成術＋後方固定術

総合新川橋病院
整形外科部長 脊椎・脊髄センター長
須賀 雄一 先生

症 例


L3圧迫骨折

(20歳代・男性)

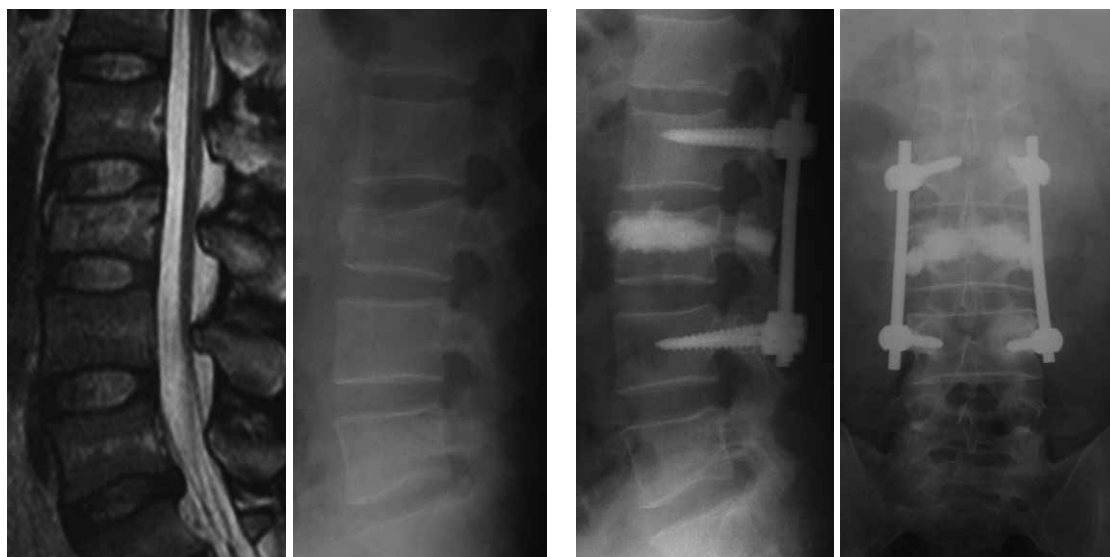

術前

術直後

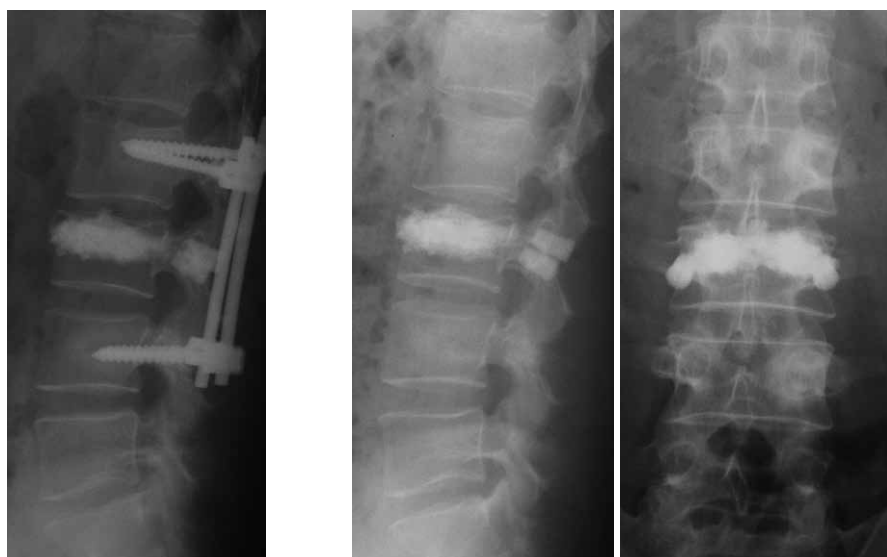

術後1年

術後1年4か月(抜釘)

- 高所から転落して受傷。腰痛のみで神経症状なし。
- XPではL3椎体圧壊と上位終板の損傷がみられた。
- 若年であるため変形遺残を危惧し、HAブロックによる椎体形成術を施行した。
- OVFと違い、骨折部にしかHAブロックは挿入できない。
- L2/3椎間板損傷があるため、1 above 1 belowの固定を追加した。
- 骨癒合が完成し抜釘を行った。
- 抜釘後1年では、L2/3椎間板腔の軽度狭小化を認めるも、骨折椎体の矯正損失はなくアライメントは良好である。

APACERAM® HAブロック 臨床ケースレポート




HAブロック 腰椎用

略称: AB-02

品番: U4-004-BA-215

チューブ1本につき6個入り

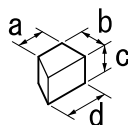


品 番	気孔率 (%)	定形寸法 (mm)				体積/個 (ml)	包 装
		a	b	c	d		
U4-004-BA-215	30	4	3.3	3.3	6	0.054	6粒×5本入

アパセラム-U4 医療機器承認番号: 22200BZX00816000



挿入口閉鎖用HAプラグ

略称: AB-19-02

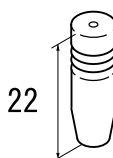

品番	適用部位	気孔率(%)	定形寸法 (mm)	体積/個 (ml)	包装
U1-079-PA-0622	胸椎	0	直径6	0.565	1個入
U1-079-PA-0722	腰椎		直径7	0.769	
U1-079-PA-0922			直径9	1.272	

アパセラム-U1 医療機器承認番号: 22200BZX00815000

販売名: アパセラム-U1 医療機器承認番号 22200BZX00815000
高度管理医療機器(クラスⅢ) 人工骨インプラント
販売名: アパセラム-U4 医療機器承認番号 22200BZX00816000
高度管理医療機器(クラスⅢ) 人工骨インプラント
販売名: 人工骨専用手術器械 医療機器届出番号 13B1X0173101002
一般医療機器(クラスⅠ) 骨手術用器械

- 本資料の手術手技はあくまでも医師の判断のもとで実施されたものであり、臨床成績を保証するものではありません。
- 写真・形状図は実物大ではございません。
- 電子添文をよく読んでから使用してください。

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社 www.hoyatechnosurgical.co.jp

■本 社 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 TEL: 03-5369-1710 FAX: 03-5369-1711
■札幌営業所 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL: 011-241-3473 FAX: 011-241-3472
■仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL: 022-371-6944 FAX: 022-371-8924
■名古屋営業所 〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27 TEL: 052-955-8572 FAX: 052-955-8573
■大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL: 06-6263-1679 FAX: 06-6263-1686
■福岡営業所 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL: 092-262-6320 FAX: 092-262-6330

