



Collagen Hybrid ReFit リフィット®

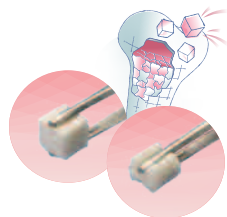

製品一覧

償還分類；078 人工骨 (1) 汎用型 ②吸収型 イ多孔体 ii 蛋白質配合型

PB-101010

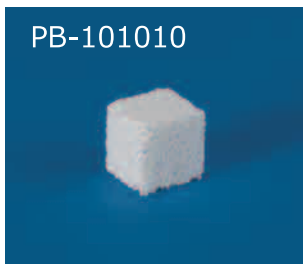

PB-103020



形 状	品 番	寸 法	包装単位/箱	区分名略称
ブロック	PB-101010	10×10×10 mm	1個 (1.0mL)	人工骨：AB-06-2
	PB-103020	10×30×20 mm	1個 (6.0mL)	

【使用目的、効能または効果】

- 以下の骨欠損における骨再生の促進
 - 骨腫瘍等、疾病の治療により生じた骨欠損
 - 骨折等、外傷により生じた骨欠損
 - 自家骨採取により生じた骨欠損
- 自家骨(同種骨)移植の補助/代替

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- アナフィラキシーの既往のあるアレルギー患者または 重度のアレルギー患者、もしくは他のブタコラーゲン含有製剤に対するアレルギーのあることが知られている患者。

※仕様、形状は一部変更することもあります。
※掲載の写真 は実物大ではございません。

PENTAX

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 YKBエンサインビル
TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711

■札幌オフィス 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL:011-241-3473 FAX:011-241-3472
■仙台オフィス 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL:022-371-6944 FAX:022-371-8924
■名古屋オフィス 〒461-0001 名古屋市中区東1-21-27 TEL:052-955-8572 FAX:052-955-8573
■大阪オフィス 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL:06-6263-1679 FAX:06-6263-1686
■福岡オフィス 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL:092-281-6860 FAX:092-281-6869

URL www.hoyatechnosurgical.co.jp

ご注文先

益子工場

〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町大字塙858
TEL 0285-72-6253 FAX 0285-72-6259




RF102101
2014年12月作成

PENTAX


医療用品 4. 整形用品 高度管理医療機器 コラーゲン使用人工骨

Collagen Hybrid ReFit リフィット®

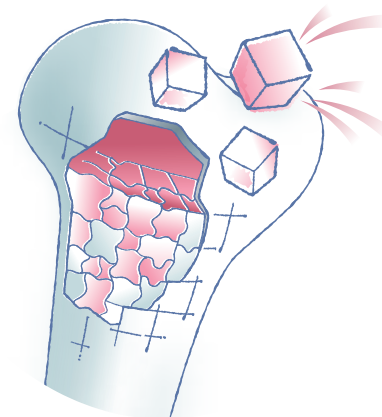

臨床ケースレポート

監修：社会医療法人 松本快生会 西奈良中央病院
整形外科 橋内智尚先生

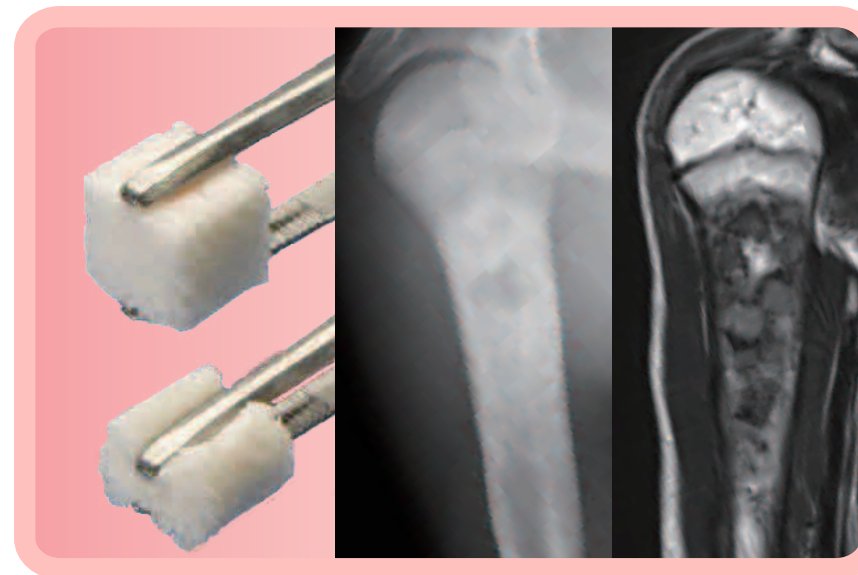

症例

右上腕骨腫瘍(動脈瘤様骨嚢腫)

14歳 / 小児



術前



術直後



術後2ヶ月(抜釘時)



術後3ヶ月



術後5ヶ月



術後7ヶ月

CT画像




術前




術後3ヶ月

MRI画像

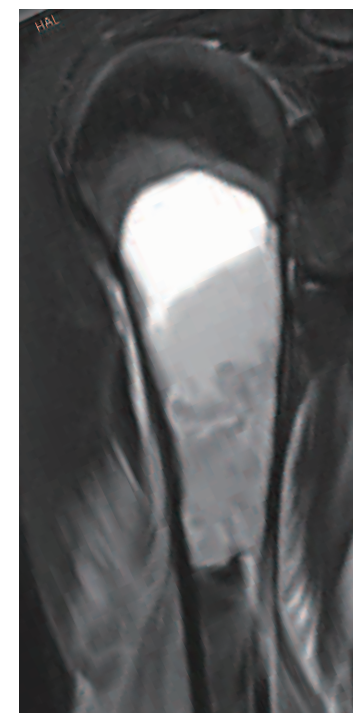

術前

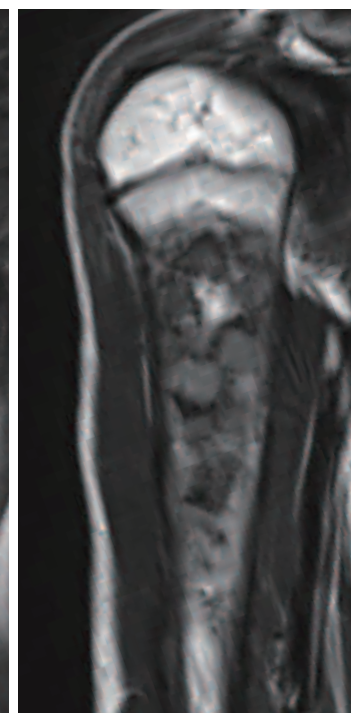

術後5ヶ月

PB-101010



10×10×10 mm

投球中に疼痛発現し受診。T2強調MRIにおいて髄内高輝度変化が認められたため骨腫瘍による上腕骨骨幹部の病的骨折(A0分類:12-A,1)と診断。術中、開窓部より血腫を含んだ排膿を認める。腫瘍搔爬後、生理食塩液で湿潤させたりフィット50mL、スーパーポア※14mLを補填、骨折部位は整復後、キルシュナー鋼線で固定。術直後～術後3週はシーネ固定、2週で架橋仮骨を確認。術後2ヶ月で抜釘、4ヶ月で骨癒合と判断し投球許可。術後5ヶ月のMRIでは腫瘍の再発を認めず、ピッチャーとして完全復帰している。術後7ヶ月、疼痛、可動域制限なく、X線で架橋仮骨の増加を認める。

社会医療法人 松本快生会 西奈良中央病院 整形外科 橋内智尚先生

※販売名 スーパーポア β型リン酸三カルシウム吸収性人工骨 医療機器承認番号:22200BZX00652000