

医療用品 4. 整形用品 高度管理医療機器 コラーゲン使用人工骨

ReFit Collagen Hybrid
リフィット®

臨床ケースレポート

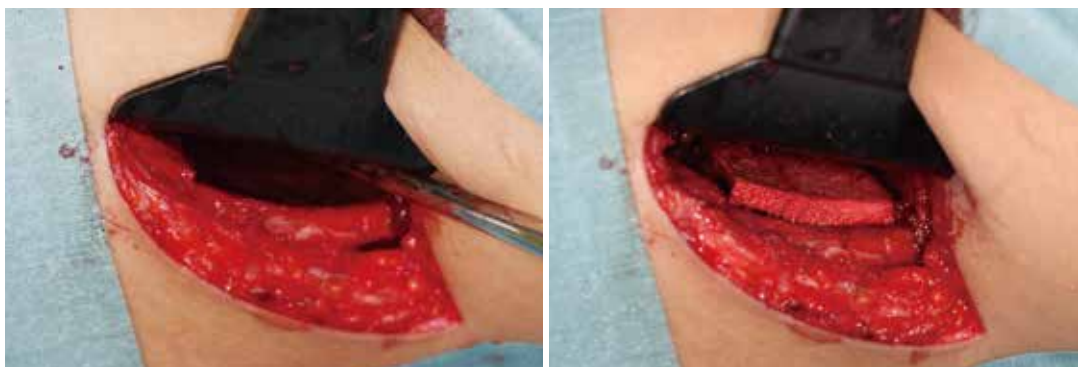


図1 術中写真

リフィットは生理食塩水を含浸させるとスポンジ状の弾力性を示すことから、骨欠損部に対して補填不良部分を生じることなくフィットしやすい。


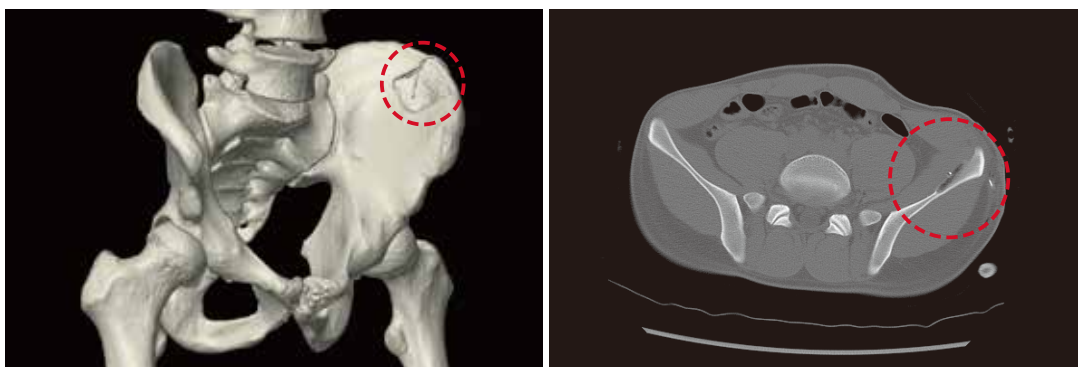


図2 術後CT像

術後1日目CT

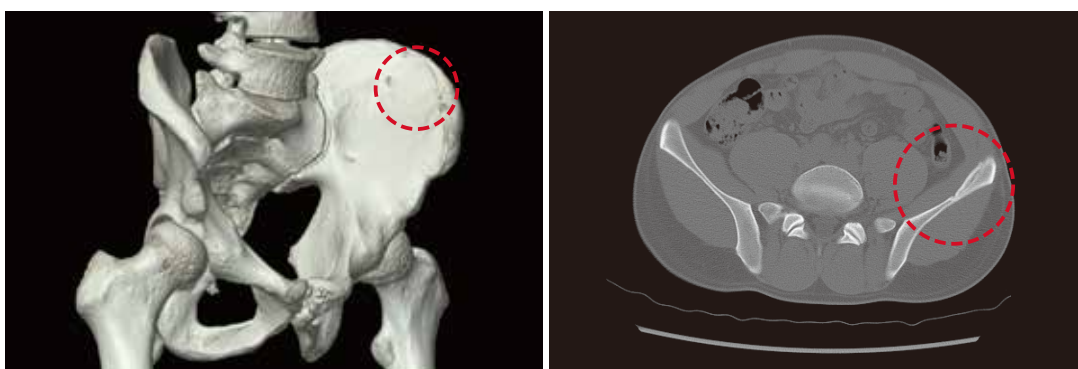

術後6ヶ月後CT

症例

腸骨採骨への補填
(19歳 男性)

右眼窩底骨折に対し、左腸骨内板より大きさ30×40×3mmの皮質骨・海綿骨を採取し眼窩底を再建した。その際、左腸骨内板に生じた骨欠損部に対してリフィット(10×30×20mm ブロック1個:6mL)を補填した(図1)。疼痛を認めず、術後2日目より歩行が可能であった。術後6ヶ月後において、腸骨採取部の骨形成は良好であった(図2)。

【ポイント】

- ① 術後疼痛が軽減され、歩行開始までの期間が短縮できる。
- ② 血腫予防と骨形成の促進を目的とした死腔充填ができる。


公立豊岡病院 形成外科 井内 友美 先生
近畿大学医学部 形成外科 諸富 公昭 先生





Collagen Hybrid

リフィット®

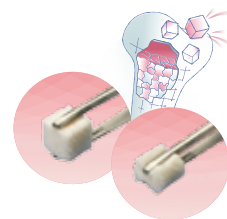

製品一覧

PB-101010



PB-103020



形 状	品 番	寸 法	包装単位/箱	区分名略称
ブロック	PB-101010	10×10×10 mm	1個 (1.0mL)	人工骨 : AB-06-2
	PB-103020	10×30×20 mm	1個 (6.0mL)	

PENTAX

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4

TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711

■札幌オフィス 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL: 011-241-3473 FAX: 011-241-3472
■仙台オフィス 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL: 022-371-6944 FAX: 022-371-8924
■名古屋オフィス 〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27 TEL: 052-955-8572 FAX: 052-955-8573
■大阪オフィス 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL: 06-6263-1679 FAX: 06-6263-1686
■福岡オフィス 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL: 092-281-6860 FAX: 092-281-6869

URL www.hoyatechnosurgical.co.jp

ご注文先

益子工場

〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町大字塙858

TEL 0285-72-6253 FAX 0285-72-6259